

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - ТАБЛЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ХЛОРАВИР ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Концентрация рабочего раствора по АХ, (%)	Количество таблеток (шт.), необходимых для при- готовления рабочего раствора (л)		
	5	10	20
0,015	-	1	2
0,030	1	2	4
0,060	2	4	8
0,100	3	6	12
0,200	7	14	28
0,300	10	20	40
0,500	17	34	68
0,600	20	40	80
1,000	33	66	132
2,000	67	134	268
3,000	100	200	400

0,015%
АКТИВНОГО
ХЛОРА

=

10Л ВОДЫ



+

1 ТАБЛЕТКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - ТАБЛЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ **ХЛОРАВИР**

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИ ВИРУСНЫХ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ),%	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт	0,0150	60	Протирание или орошение
	0,0300	30	
Санитарно-техническое оборудование	0,0300	120	Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин
	0,0600	60	
Посуда без остатков пищи	0,015	15	Погружение
Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи	0,100	120	Погружение
Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	0,100	120	Погружение
Белье незагрязненное	0,015	60	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0,200	120	Замачивание
	0,300	60	
Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования	0,200	120	Замачивание (погружение)
	0,300	60	
Уборочный инвентарь для обработки помещений	0,030	30	Замачивание (погружение)
Предметы ухода за больными	0,060	90	Протирание или погружение
	0,100	60	
Игрушки	0,060	15	Протирание или погружение



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

Государственный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.99.88.002.E.000249.01.22 от 31.01.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

средство дезинфицирующее "Хлоравир". Область применения: в соответствии с инструкцией по применению средства от 15.06.2021 г. № 2/21. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.20.14-001-13967809-2020.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "КемПлант" 658087, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г. Новоалтайск, ул. Октябренок, зд. 81 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябренок, д. 81), Российская Федерация.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "КемПлант" 658087, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г. Новоалтайск, ул. Октябренок, зд. 81, Российская Федерация. ОГРН: 1152225016195

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

взамен свидетельства о государственной регистрации №RU.77.99.32.002.E.002100.06.21 от 21.06.2021 г.; экспертного заключения ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546) от 15.06.2021 г. № 77-53-13/638-2021-5; ТУ; рецептуры; этикетки; инструкции по применению средства от 15.06.2021 г. № 2/21.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Заместитель руководителя

(должность, руководитель (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора)



И.В. Брагина

(Ф.И.О.)

№ 0436819

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA 01.В.14559/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМПЛАНТ",
ООО "КЕМПЛАНТ", место нахождения 658087, РОССИЯ, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г. Новоалтайск,
УЛ. ОКТЯБРЕНОК, ЗД. 81, ОГРН 1152225016195, ИНН 2222839658, телефон +7 9050758626,
электронная почта sale@nika.farm, места осуществления деятельности: 658087, РОССИЯ,
Алтайский край, г Новоалтайск, ул. Октябренск, здание 81

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ШУШАКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее "Хлоравир",
Средство дезинфицирующее "Хлоравир", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМПЛАНТ", ООО "КЕМПЛАНТ", 658087, РОССИЯ, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ,
Г. Новоалтайск, УЛ. ОКТЯБРЕНОК, ЗД. 81, адрес места осуществления деятельности: 658087,
РОССИЯ, Алтайский край, г Новоалтайск, ул. Октябренск, здание 81, ОГРН 1152225016195,
ИНН 2222839658, ГОСТ 12.1.007-76, "Система стандартов безопасности труда. Вредные
вещества. Классификация и общие требования безопасности", Подпункты 1.2, 1.3, Серийный
выпуск, Информационное письмо № б/н, от 23.12.2021; Свидетельство о государственной
регистрации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Российская Федерация № RU.77.99.88.002.Е.000249.01.22, от 31.01.2022г.

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808948000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76, "Система стандартов безопасности труда.
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", Подпункты 1.2, 1.3;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 11.048-4359/21 выдан 07.04.2021
испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ Роспотребнадзора" РОСС RU 0001.510546;
09.49-4359/21 выдан 25.03.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН НИИ СБМ
Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.510546; другие документы представленные заявителем: Информационное письмо, б/н, выдан
23.12.2021; Свидетельство о государственной регистрации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Российская Федерация, RU.77.99.88.002.Е.000249.01.22, выдан 31.01.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Хранить в прохладном месте, в вентилируемых помещениях, в закрытых
емкостях, вдали от источников тепла и солнечного света, при температуре от минус 45°С до плюс 40°С, отдельно от
лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах недоступных детям. Недопустимо хранение рядом с
органическими продуктами, горючими материалами и кислотами

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 22.04.2022 по 22.04.2025

Заявитель
М.П.
(при наличии)

подпись

ШУШАКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу
применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по
обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим
регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора,
ВрИО директора
ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора


«15» ИЮНЯ 2021 г. Т.В. Гололобова

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Ника»

_____ Е.В. Шушакова
«__» _____ 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2/21

по применению средства дезинфицирующего «Хлоравир»

Москва, 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2/21
по применению средства дезинфицирующего «Хлоравир»

Инструкция разработана в ФБУН «Научно-исследовательский институт
дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Авторы: Федорова Л.С., Панкратова Г.П., Андреев С.В.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство «Хлоравир» предназначено для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, медицинских изделий (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла) посуды, в том числе лабораторной (включая одноразового использования), аптечной, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, белья, уборочного инвентаря, крови, выделений (мокрота, рвотные, фекальные массы, моча), смывных жидкостей (эндоскопические, после ополаскивания зева и др.), остатков пищи, медицинских отходов классов Б и В из текстильных и других материалов (перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, медицинские изделия одноразового применения и белье одноразовое перед утилизацией), игрушек, резиновых и полипропиленовых ковров, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в медицинских организациях различного профиля, инфекционных очагах, на санитарном транспорте, при проведении профилактической дезинфекции систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусоросборники, мусоровозы), на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туалеты), торговых, развлекательных центрах, продовольственных и промышленных рынках, организациях образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, санпропускники, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кинотеатры, музеи и др.), учреждениях пенитенциарных, социального обеспечения (дома инвалидов, престарелых и др.), на предприятиях общественного питания и торговли (рестораны, бары, кафе, столовые); на объектах транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородные поезда) и т.п.; для заключительной дезинфекции в детских организациях; проведения генеральных уборок.

1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, коронавирусов,

гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5N1, А H1N1, коронавирусов, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода *Candida*, дерматофитов.

1.3. Средство представляет собой таблетки белого цвета с характерным запахом хлора, содержащие натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты с функциональными добавками. Массовая доля активного хлора от 40,0 до 49,0 %. Средняя масса одной таблетки от 3,20 до 3,50 г, время распадаемости не более 10 минут, масса активного хлора в одной таблетке 1,54 г.

Срок годности средства - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке изготовителя.

Водные растворы прозрачные, имеют запах хлора.

Средство выпускают в мешках полиэтиленовых 10-50 кг, пакетах полиэтиленовых массой 50-1000 г, банках полиэтиленовых массой 50-2000 г, ведрах полиэтиленовых массой 2000-10000 г, банках полимерных вместимостью до 5 кг и мешках полимерных вместимостью до 50 кг.

1.4 Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных, при нанесении на кожу – к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) относится к 3 классу умеренно опасных веществ согласно Классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести; вызывает раздражение кожи и выраженное раздражение слизистых оболочек глаз; не обладает сенсибилизирующими свойствами.

Рабочие растворы с содержанием АХ от 0,1% и выше при использовании способами орошения и протирания вызывают раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз.

ПДК хлора в воздухе рабочей зоны 1 мг/м³ (пары + аэрозоль, 2 класс опасности).

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения соответствующего количества таблеток в водопроводной питьевой воде комнатной температуры до полного их растворения (таблица 1).

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов средства «Хлоравир»

Концентрация рабочего раствора по АХ, (%)	Количество таблеток (шт.), необходимых для приготовления рабочего раствора (л)		
	1	5	10
0,015	-	-	1
0,030	-	1	2
0,060	-	2	4
0,100	-	-	-
0,200	-	-	13
0,300	2	10	20
0,400	-	13	26
0,500	-	-	-
0,600	4	20	40
1,000	-	33	65
1,500	-	49	98
2,000	13	65	130
3,000	-	98	196

Примечание—масса активного хлора в одной таблетке 1,54

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

3.1 Растворы средства применяют для обеззараживания объектов, указанных в п. 1.1.

3.2 Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

Емкости с рабочими растворами для дезинфекции предметов ухода за больными, белья, посуды, выделений, предметов для мытья посуды игрушек, уборочного материала должны иметь крышки и быть плотно закрыты.

3.3 Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают тканевой салфеткой, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства 150 мл/м² обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл/м² при использовании Автомакса или 150 мл/м² – при использовании распылителя типа «Квазар». После окончания дезинфекции в помещении проводят влажную уборку, помещение проветривают, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой тканевой салфеткой.

При добавлении моющих средств, разрешенных для применения в медицинских организациях (из расчета 5 г/л раствора), при обработке поверхностей способом протирания норма расхода 100 мл/м² для однократной обработки.

3.4 Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают тканевой салфеткой, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/м² обрабатываемой поверхности; при обработке способом орошения – 300 мл/м² при использовании Автомакса или

150 мл/м² – при использовании распылителя типа «Квазар». По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые коврики обеззараживают, протирая салфеткой, смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.5 Предметы ухода за больными (судна, подкладные клеёнки, мочеприёмники, наконечники для клизм и др.), предметы личной гигиены, игрушки (кроме мягких) полностью погружают в ёмкость с рабочим раствором средства или протирают салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства. Крупные игрушки обеззараживают способом орошения. По окончании дезинфекции промывают проточной питьевой водой.

3.6 Мелкие игрушки полностью погружают в ёмкость с рабочим раствором средства, препятствуя их всплытию, крупные протирают ветошью, смоченной в растворе, или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.7 Бельё замачивают в рабочем растворе средства при норме расхода 4 л на 1 кг сухого белья (при туберкулезе – 5 л/кг сухого белья). Ёмкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки бельё стирают и прополаскивают до исчезновения запаха хлора.

3.8 Уборочный инвентарь (тканевые салфетки, щетки, ерши) замачивают (погружают) в рабочем растворе средства в ёмкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.9. Предметы для мытья посуды (губки, ерши и др.) погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.10. Чайную и столовую посуду, освобожденную от остатков пищи, полностью погружают в раствор средства. Норма расхода раствора – 2 л на комплект столовой посуды. Ёмкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают водой не менее 3 минут до исчезновения запаха хлора. Посуду однократного использования после дезинфекции утилизируют.

3.11 Посуду лабораторную (пробирки, колбы, покровные стекла, чашки Петри, резиновые груши, пластмассовые и резиновые пробки и т.д.), аптечную, в том числе однократного использования, полностью погружают в рабочий раствор средства, после окончания времени дезинфекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой не менее 3 минут до исчезновения запаха хлора, а посуду однократного использования утилизируют.

3.12 Обувь из резины, пластмасс и других полимерных материалов погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки промывают водой до исчезновения запаха хлора и высушивают.

3.13 Биологические выделения (фекалии, рвотные массы, моча, мокрота) обеззараживают растворами средства в соответствии с рекомендациями таблиц 8-9.

Фекалии, рвотные массы, мокроту собирают в емкости, заливают дезинфицирующим раствором. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции выделения (фекалии, остатки пищи, рвотные массы) утилизируют.

В мочу добавляют необходимое количество таблеток и перемешивают их до полного растворения. Емкости закрывают крышкой. По окончании дезинфекции мочу сливают в канализацию.

3.14 Биологические жидкости (кровь без сгустков и др.), собранные в емкость, аккуратно (не допуская разбрызгивания) заливают определенными объемами раствора средства. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции смесь обеззараженной крови и средства утилизируют.

Плевательницы с мокротой загружают в емкости и заливают равным или двойным объемом раствора средства. Емкости закрывают крышками. По окончании дезинфекции плевательницы промывают водой до исчезновения запаха хлора.

Емкости из-под выделений (фекалий, мочи, мокроты и др.), емкости из-под биологических жидкостей (кровь и др.) погружают в раствор средства или заливают раствором. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции емкости из-под выделений промывают проточной питьевой водой, а посуду однократного использования утилизируют.

3.15 Медицинские отходы классов Б и В – медицинские изделия однократного применения из различных материалов (одноразовые шприцы, системы, фильтры, перчатки, предметы ухода за больными т.д.) текстильные материалы (постельное и нательное белье, перевязочный материал, марлевые и ватные тампоны, салфетки, одноразовая спецодежда-халаты, маски, шапочки, пеленки, памперсы и др.), лабораторную посуду (чашки Петри, пипетки, пробирки, флаконы, посуда из под выделений или других субстратов и др.) и биологические отходы обрабатывают по режимам, приведенным в таблицах 2-6, 8-10 в зависимости от объекта и вида контаминации.

Обработку изделий однократного применения проводят согласно п.3.11.

По окончании дезинфекции медицинские отходы утилизируют.

3.16 Транспорт (санитарный, для перевозки пищевых продуктов, общественный, мусоровозы и др.) протирают салфеткой, смоченной в растворе средства, или орошают из автомата, распылителя типа «Квазар». Нормы расхода растворов средства указаны в п.3.3.

Санитарный транспорт после перевозки инфекционного больного дезинфицируют по режимам соответствующей инфекции.

3.17 Режимы дезинфекции объектов, контаминированных различными видами возбудителей инфекций, приведены в таблицах 2-10.

3.18 На коммунальных объектах (гостиницы, общежития, общественные туалеты и др.), учреждениях культуры, отдыха (кинотеатры, офисы и др.), предприятиях общественного питания и торговли, учреждениях социального

обеспечения, других общественных местах, объектах системы мусороудаления (мусороуборочного оборудования, инвентаря, мусоросборников и мусоровозов) обработку проводят по режимам, указанным в таблице 2, для пенитенциарных – таблица 4.

3.19 В банях, саунах, бассейнах, спортивных комплексах, парикмахерских, косметических салонах и др. дезинфекцию объектов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (таблица 6).

Таблица 2 – Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Хлоравир» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д., санитарный транспорт	0,015	60	Протирание или орошение
	0,03	30	
Санитарно-техническое оборудование	0,03	120	Двукратное протирание с интервалом 15 мин
	0,06	60	Двукратное орошение с интервалом 15 мин
Посуда без остатков пищи	0,015	15	Погружение
Посуда (в том числе однократного использования) с остатками пищи	0,1	120	Погружение
Предметы для мытья посуды	0,1	120	Погружение
Посуда лабораторная (в том числе однократного использования)	0,1	120	Погружение
Белье незагрязненное	0,015	60	Замачивание
Белье, загрязненное выделениями	0,2	120	Замачивание
Уборочный инвентарь для обработки помещений	0,03	30	Замачивание (погружение)
Уборочный инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования	0,2	120	Замачивание (погружение)
Предметы ухода за больными	0,06	90	Протирание или погружение
	0,1	60	
Игрушки	0,03	60	Протирание или погружение